

BIP

Komplett einhandbedienbar


Wahlweise vollautomatische / halbautomatische Biopsie




Verstellbare Einschusstiefe




Kurze Spitze minimiert Trauma

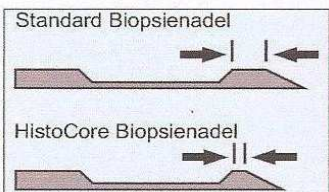

Statusfenster: gespannt / ungespannt / Entleerung

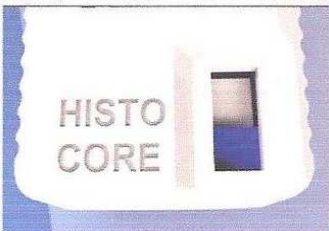

Koax-Entriegelung mit einer Hand!

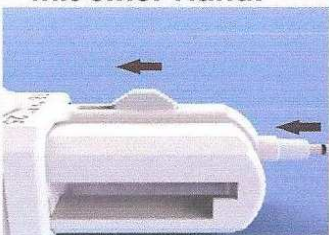


HistoCore

Next Generation

Einmal - Biopsiesystem

Steriles Biopsiegerät zur histologischen Weichteil - Gewebeentnahme.

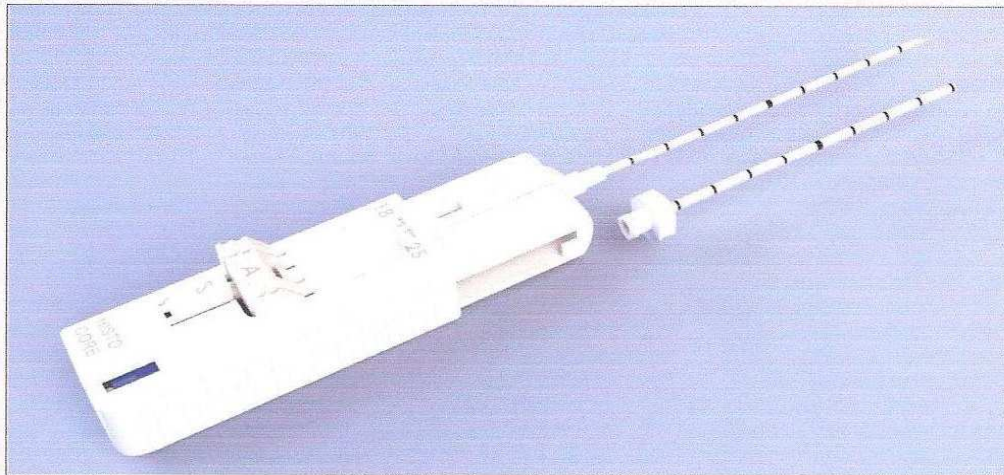

Bessere Gewebeergebnisse:

Das kraftvolle Energiespeicher-Federsystem sorgt für beste Biopsieergebnisse, wie sie bisher nur bei wiederverwendbaren Geräten erzielt wurden.

Die Möglichkeit der halbautomatischen Biopsie erhöht darüber hinaus die Gewebeausbeute für einige Applikationen deutlich.

Aufgrund der umschaltbaren Einschusstiefe (18/25mm) lässt sich das HistoCore Biopsiegerät optimal auf den Anwendungsbereich einstellen.

Geringere Nebenwirkungen:

Die kürzere Nadelspitze bewirkt weniger Traumatisierung des Gewebes hinter dem Befund. Bedingt durch sehr geringe Fertigungstoleranzen in der Geräteproduktion konnte der Bereich zwischen Gewebesammelkerbe und Beginn der Spitzenschräge deutlich verkürzt werden.

Sichere Anwendung:

Der Status des Gerätes (gespannt, teilgespannt oder ungespannt) wird am Statusfenster angezeigt. Protpektoren neben dem Auslöser schützen vor versehentlichem Auslösen.

Koaxialkanüle:

Die optionale Koaxialkanüle ist auf dem HistoCore Gerät bereits montiert und vereinfacht die Anwendung durch eine neuartige Einhand-Koax-Entriegelung.

Verschiedene Nadelgrößen decken alle Bereiche der Weichteilbiopsie ab:

Bestellnummern / Technische Daten:

Material: Edelstahl, Kunststoff

Gerätelänge: 123mm
Gewicht: ca. 45g

Made in Germany

Durchm. / Länge	100mm	130mm	160mm	200mm	240mm
20G/0,95mm	HC20100		HC20160		
18G/1,25mm	HC18100	HC18130	HC18160	HC1820	HC18240
16G/1,65mm			HC16160	HC1620	HC16240
14G/2,1mm	HC14100X	HC14130X	HC14160		
12G/2,3mm	HC12100X	HC12130X	HC12160		

("X"=optionale Koax vormontiert, "X" weglassen für Standardgerät)

BIP

BIOMED.-INSTRUMENTE & PRODUKTE GmbH

Am Brand 1, D-82299 Türkenfeld, Germany
Tel: +49 (0)8193 9318 0 Fax: +49 (0)8193 6548
info@bipmedical.com
www.biopsiegeraete.de

Mecco Medical

Mecco Medical GmbH, Tel +41 62 534 67 11, www.mecco.ch, info@mecco.ch